

WLAN-Ohrreiniger

mit hochauflösender Kamera & App, IP67

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Ohrreinigers. Reinigen und inspizieren Sie das Innere Ihres Ohres kabellos und in hochauflösender Kamera-Qualität.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Ohrreiniger optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- · Ohrreiniger inkl. Metall-Ohrlöffel
- · Ersatz-Kunststoff-Ohrlöffel
- USB-Kabel (USB-A zu micro-USB)
- Anleitung

Zusätzlich benötigt:

• USB-Netzteil (z.B. PX-2421)

Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC 1 A
Akkuleistung		185 mAh
WLAN	Funkfrequenz	2412 – 2462 MHz
	Sendeleistung	12 dBm
	Reichweite	5 m
Bildsensor		CMOS, 3 MP
Bildformat		JPG
Videoformat		MP4
Max. Aufnahmezeit		50 min
Maße		17,3 × 6,2 × 2 cm
Gewicht		49 g

Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Ohrenreiniger und ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Bebird**.

Produktdetails



- 1. Spitze für Aufsätze
- 2. microUSB-Eingang

Inbetriebnahme

- Laden Sie den Ohrreiniger vor der ersten Benutzung vollständig auf. Verbinden Sie dazu das enthaltene microUSB-Kabel mit einem passenden USB-Netzteil. Stecken Sie den microUSB-Stecker dann die USB-Buchse des Ohrreinigers.
- 2. Wählen Sie den gewünschen Aufsatz aus und bringen ihn auf die Spitze des Ohrreinigers an.

Verwendung

- 1. Installieren Sie die App Bebird auf Ihrem Smartphone.
- 2. Um den Ohrenreiniger einzuschalten, nehmen Sie einfach den
- 3. Schalten Sie das WLAN an Ihrem Smartphone ein und verbinden Sie Ihr Smartphone in den WLAN-Einstellungen mit dem Netzwek Bebird-**** (Ohrreiniger).
- 4. Öffnen Sie die App. Bei erfolgreicher Verbindung wird Ihnen in der App sowohl ID als auch Batterie-Ladung angezeigt.
- 5. Wählen Sie nun die gewünschte Funktion aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-5235-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Wilan A.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5235 ein.





Nettoyeur d'oreille connecté

avec caméra

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce nettoyeur d'oreille. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- · Nettoyeur d'oreille avec cure-oreille en métal
- · Cure-oreille de rechange en plastique
- Câble USB (USB-A vers Micro-USB)
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr:

Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC 1 A
Puissance de la batterie		185 mAh
Réseau Internet sans fil	Fréquence radio	2412 – 2462 MHz
	Puissance d'émission	12 dBm
	Portée	5 m
Capteur d'image		CMOS, 3 MP
Format de l'image		JPG
Format vidéo		MP4
Durée max. d'enregistrement		50 min
Dimensions		17,3 × 6,2 × 2 cm
Poids		49 g

Application recommandée

Une application est requise afin d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite Bebird.

Description du produit



- 1. Pointe pour embouts
- 2. Entrée Micro-USB

Mise en marche

- 1. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Pour ce faire, branchez le câble Micro-USB à un adaptateur secteur USB approprié. Insérez ensuite le connecteur Micro-USB dans le port USB du nettoyeur d'oreille.
- 2. Choisissez l'embout souhaité et fixez-le à l'extrémité du nettoyeur d'oreille.

Utilisation

- 1. Installez l'application Bebird sur votre smartphone.
- 2. Pour mettre en marche le nettoyeur d'oreille, il suffit d'enlever le
- 3. Activez la fonction wifi sur votre smartphone et connectez votre smartphone au réseau Bebird-**** (nettoyeur d'oreille) dans les paramètres wifi.
- 4. Ouvrez l'application. Si la connexion est réussie, l'application affiche à la fois l'ID et le niveau de chargement de la batterie.
- 5. Sélectionnez la fonction souhaitée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures!
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer. enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/ année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-5235 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE. relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Muchass.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



